

**КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  
OSD-94U**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**



Спасибо, что отдали предпочтение нашей продукции.  
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и  
придерживайтесь ее во время использования изделия.



Это изделие соответствует стандарту европейской Директивы  
93/42/ЕЕС



Не используйте кровать, не ознакомившись с инструкцией

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание
2. Технические характеристики
3. Инструкция
4. Общие указания
5. Обслуживание
6. Предупреждение
7. Гарантия

### 1. ОПИСАНИЕ

Кровать медицинское функциональное OSD-94U принадлежит к 1-му классу медицинских изделий; используется для пациентов в больницах, а также в домашних условиях. Конструкция кровати состоит из металлической рамы с порошковым покрытием, четырех металлических секций, спинки с PE пластика, перил из PE пластика, электрического мотора и пульта дистанционного управления; ножки оснащены 5-дюймовыми колесами с тормозами. Пульт управления позволяет регулировать угол наклона головной и ножной секции, что обеспечивает максимальный комфорт пациенту и персоналу. Кровать выкрашена в бежевый цвет, боковые спинки украшены кремовыми металлическими панелями бежевого цвета. Дополнительно кровать со стороны главной секции можно комплектовать надкроватьной трапезией; также можно комплектовать по желанию клиента универсальными перилами.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка: 200 кг


Длина матрасной базы: 200 см



Общая длина: 206 см

Общая ширина: 92 см

Высота от пола: 34-64 см

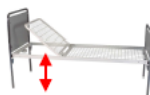

Цвет: серый

Угол наклона головной секции: 80°


Угол наклона ножной секции: 35°



## ИНСТРУКЦИЯ


Кровать доставляется в разобранном виде. Сборка и настройка медицинской кровати не требуют особых навыков или знаний, специального инструмента.

**Остерегайтесь защемления пальцев!**

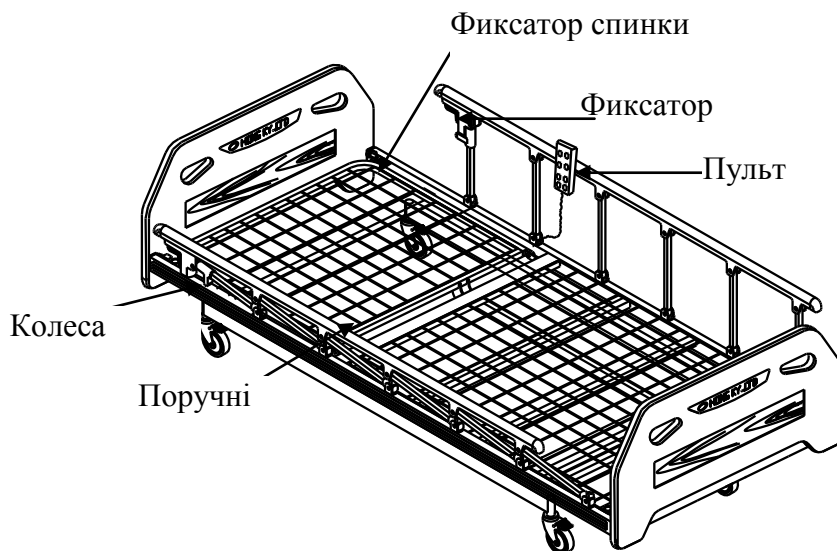

### КОЛЕСА:

- Наступить → чтобы заблокировать (1a)
- Поднять носком обуви заглушку → чтобы разблокировать (1b)

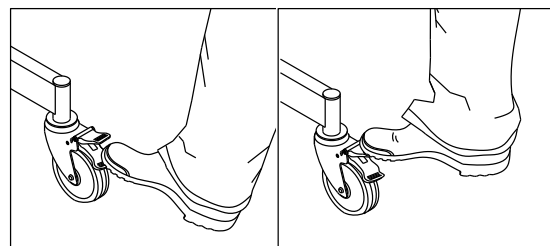


1a

1b

### Головные и ножные спинки:


Легко снимаются при помощи двух красных фиксаторов, размещенных в углах спинок.

**Чтобы снять:** Одновременно освободите два красных фиксатора по углам кровати и поднимите спинку (рис. 2d)

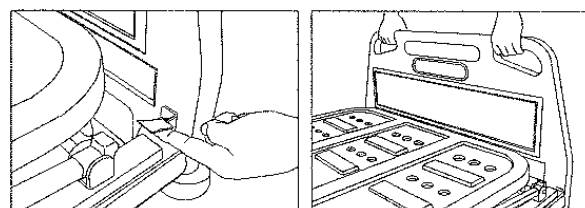


2d


**Чтобы установить:** Оставьте в открытом положении два красных фиксатора (рис. 2a), потом вставьте спинку так, как показано на рисунке (2b) и защелкните фиксаторы вниз (2c)

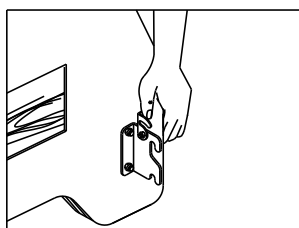

2a

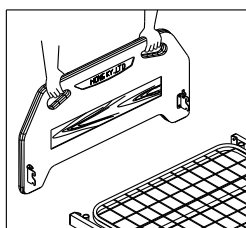

2b

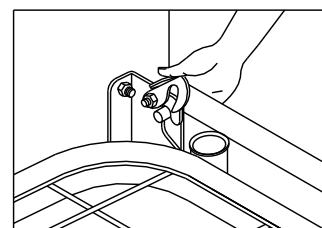

2c

#### 4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

К использованию ПРОВЕРЬТЕ работу подвижных частей кровати. УБЕДИТЕСЬ в надлежащей фиксации всех частей кровати. Применяйте мягкий детергент и теплую воду для обработки изделия. ИЗБЕГАЙТЕ попадания влаги к электромотору.

#### 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все металлические части кровати окрашены или хромированы с целью повышения устойчивости конструкции к коррозии и для легкой гигиенической обработки. Необходимо минимум раз в год проводить обзор всех компонентов изделия на наличие повреждений.

#### 6. ВНИМАНИЕ!



Не превышайте максимальную нагрузку на кровать в 200 кг. Предотвращайте попадание частей тела на подвижные части кровати; остерегайтесь защемления пальцев и т.д. Не крутите ручку регулировки угла наклона секции, если чувствуете значительную (избыточную) нагрузку.

Виробник: HONG KY CO., LTD.  
BINH CHUAN PRODUCTION  
ZONE 7200, BINH DUONG  
PROVINCE, VIETNAM  
Імпортер: ТОВ "ОСД Східна  
Європа", м. Київ

[osd.import@gmail.com](mailto:osd.import@gmail.com)

CP	9405/2010
	24.03.2010

## 7. ГАРАНТИЯ



### Условия гарантии:

ООО «ОСД Восточная Европа» гарантирует отсутствие заводских дефектов и работу устройства в течение гарантийного периода 12 месяцев с даты покупки при соблюдении правил эксплуатации изделия изложенных в инструкции.

1. Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока.

2. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- а) нарушение правил эксплуатации, изложенных в инструкции.
- б) при наличии следов постороннего вмешательства (попытка самостоятельного ремонта изделия)
- в) если устройство использовался не по назначению

3. Гарантия не распространяется на:

- а) механические повреждения или повреждения вследствие транспортировки.
- б) повреждения, вызванные попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей.
- в) повреждения, вызванные бытовыми факторами, внешними действиями (перепады напряжения в сети), неправильное подключение устройства.

4. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня покупки.

Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_